

Softkanüle	Accu-Chek® Insight Flex	Accu-Chek® Insight Tender	Accu-Chek® FlexLink	Accu-Chek® TenderLink	Cleo™ 90
Hersteller/Vertrieb	Roche Diabetes Care	Roche Diabetes Care	Roche Diabetes Care	Roche Diabetes Care	Smiths Medical
Kanülenlängen/ Durchmesser	6, 8, 10 mm/ Ø 0,5 mm	13, 17 mm/ Ø 0,5 mm	6, 8, 10 mm/ Ø 0,5 mm	13, 17 mm/ Ø 0,5 mm	6, 9 mm/ Ø 0,36 mm
Schlauchlängen	40, 70, 100 cm	40, 70, 100 cm	30, 60, 80, 110 cm	30, 60, 80, 110 cm	60, 80, 110 cm
Kanülen einzeln erhältlich	ja	ja	ja	ja	nein

Softkanüle	mylife™ Orbit®soft	mylife™ YpsoPump® Orbit®soft	MiniMed® Mio™	MiniMed® Quick-set™	MiniMed® Silhouette®
Hersteller/Vertrieb	Ypsomed	Ypsomed	Medtronic	Medtronic	Medtronic
Kanülenlängen/ Durchmesser	6, 9 mm/ Ø 0,46 mm	6, 9 mm/ Ø 0,46 mm	6, 9 mm/ Ø 0,33 mm	6, 9 mm/ Ø 0,5 mm	13, 17 mm/ Ø 0,5 mm
Schlauchlängen	45, 60, 75, 105 cm	45, 60, 80, 110 cm	45 (nur 6 mm), 60, 80 cm	45, 60, 80, 110 cm	45, 60, 80, 110 cm
Kanülen einzeln erhältlich	ja	ja	nein	nein	nein

Softkanüle	inset™ II	inset™ 30	Soft-Release-O	Soft-Release-ST
Hersteller/Vertrieb	Unomedical	Unomedical	SOOIL/IME-DC	SOOIL/IME-DC
Kanülenlängen/ Durchmesser	6, 9 mm/ Ø 0,68 mm	13 mm/ Ø 0,68 mm	6, 9 mm/ Ø 0,5 mm	19 mm/ Ø 0,5 mm
Schlauchlängen	60, 110 cm	60, 110 cm	30, 60, 80 cm	70, 110 cm
Kanülen einzeln erhältlich	nein	nein	nein	nein



Desinfektionsmittel, Hautschutz, Pflasterentferner und viele weitere Produkte finden Sie auf www.diaexpert.de.

Merkmale der Infusionssets auf einen Blick

Einführwinkel

- Einführwinkel beträgt 90°
- Einführwinkel beträgt 30°
- Einführwinkel beträgt 15 bis 30°
- Einführwinkel beträgt 20 bis 45°
- Einführwinkel ist variabel

Setzhilfe

- keine Setzhilfe vorhanden
- integrierte Setzhilfe
- separate Setzhilfe

Abkoppelbar

- ist nicht abkoppelbar
- direkt am Kanülenträger abkoppelbar
- am Verbindungsschlauch abkoppelbar

Anschlussarten

- Luer-Anschluss
- wahlweise Luer- oder MiniMed-Anschluss
- MiniMed-Anschluss
- Accu-Chek Insight-Anschluss
- mylife YpsoPump-Anschluss
- DANA-Anschluss

Stahlkanüle	Accu-Chek® Rapid-D Link	mylife™ Orbit®micro	mylife™ YpsoPump® Orbit®micro	Sure-T®
Hersteller/Vertrieb	Roche Diabetes Care	Ypsomed	Ypsomed	Medtronic
Kanülenlängen/ Durchmesser	6, 8, 10, 12 mm/ Ø 0,36 mm	5,5, 8,5 mm/ Ø 0,25 mm	5,5, 8,5 mm/ Ø 0,25 mm	6, 8, 10 mm/ Ø 0,33 mm
Schlauchlängen	30, 60, 80, 110 cm*	45, 60, 75 cm	45, 60, 80, 110 cm	45 (nur 6 mm), 60, 80 cm
Kanülen einzeln erhältlich	ja	ja	ja	nein

Stahlkanüle	EasyRelease	EasyRelease II	Superline-D	Superline-ST
Hersteller/Vertrieb	SOOIL/IME-DC	SOOIL/IME-DC	SOOIL/IME-DC	SOOIL/IME-DC
Kanülenlängen/ Durchmesser	4,5, 7, 9 mm/ Ø 0,4 mm	7, 9 mm/ Ø 0,4 mm	15, 19 mm/ Ø 0,4 mm	4,5, 6,5, 8 mm/ Ø 0,4 mm
Schlauchlängen	70, 110 cm	70, 110 cm	55 cm	55 cm
Kanülen einzeln erhältlich	nein	nein	nein	nein

Stahlkanüle	Contact™ Detach	Soft Glide
Hersteller/Vertrieb	Unomedical	EMED
Kanülenlängen/ Durchmesser	6, 8, 10 mm/ Ø 0,41 mm	6, 9, 12 mm/ Ø 0,4 mm
Schlauchlängen	60, 80, 110 cm	70, 90 cm
Kanülen einzeln erhältlich	nein	nein

Unterschiede bei den Infusionssets

Stahlkanülen sind hauchdünn. Sie sollten nach 1 bis 2 Tagen** gewechselt werden.

Softkanülen sind biegsam, machen jede Bewegung mit und sind etwas dicker als Stahlkanülen. Das Einführen wird bei den meisten Modellen durch eine Setzhilfe (Serter) erleichtert. Diese Kanülen sollten nach 2 bis 3 Tagen** gewechselt werden.

** Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte Gebrauchsanweisung beachten.

* Gesamtlänge

Ihre kostenlose Servicenummer für Beratung und Bestellung: 0800 3423973
www.diaexpert.de · info@diaexpert.de